

# Salvaescaleras HomeGlide

## Manual abreviado de puesta en marcha

Este es un manual de inicio rápido. ¡Lea el manual de usuario completo, que contiene advertencias e instrucciones importantes!

### Desplegar la silla y sentarse

1



Asiento, apoyabrazos y estribo.



Cinturón de seguridad.

### Manejo del salvaescaleras

2



Para subir o bajar, mueva el joystick hacia la dirección deseada.



Estacione siempre el salvaescaleras en un punto de recarga. (vea el bloque 7).



Gire el asiento.

- Por seguridad, existe un breve retraso entre el accionamiento del joystick y el verdadero movimiento del salvaescaleras.
- Mantenga el joystick en la dirección deseada durante todo el trayecto.
- Al final del raíl, la silla se detendrá automáticamente.

### 3 Levantarse de la silla con seguridad



Cinturón de seguridad.



Levantarse.

### 4 Pliegue de la silla



Apoyabrazos, asiento y estribo.



### 5 Uso del mando a distancia



Desplace la silla hacia arriba o hacia abajo.



Aparque siempre la silla en un punto de recarga (vea el bloque 7).

- Por seguridad, existe un breve retraso entre el accionamiento del mando a distancia y el verdadero movimiento del salvaescaleras.
- Mantenga pulsados los botones durante todo el trayecto.
- Al final del raíl, la silla se detendrá automáticamente.



Nunca desenchufe el conector de la toma eléctrica. Utilice el interruptor principal para encender o apagar el salvaescaleras.



Aparque siempre la silla en un punto de recarga para que su salvaescaleras funcione con las baterías. La silla se detiene automáticamente cuando llega a un punto de recarga.

## Señales con uso normal

### Señal

### Significado

Un pitido corto.

- El salvaescaleras se está alejando
- o está siendo manejado con el mando a distancia.

Dos pitidos cortos.

El salvaescaleras ha llegado al tope y está en un contacto de carga.

Señal	Significado	Solución
Pitidos rápidos que se repiten cada diez segundos.	El salvaescaleras no está en un contacto de carga, o la alimentación de corriente está desconectada.	Lleve el salvaescaleras a un punto de carga.
Pitidos rápidos que se repiten continuamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>- El salvaescaleras ha encontrado una obstrucción y se ha detenido.</li><li>- El asiento no está colocado correctamente.</li><li>- Hay una avería en el salvaescaleras.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aleje el salvaescaleras y retire el obstáculo.</li><li>- Gire el asiento en su posición de marcha.</li><li>- Póngase en contacto con su distribuidor.</li></ul>